

BRUKSANVISNING (NO)

Medisinsk ansiktsmaske

Les instruksjonsheftet grundig før bruk



Utgave: 2.0 24.07.2020

Produktnavn: Medisinsk ansiktsmaske

Modell: Voksen

Standard: YY/T0969-2013 EN14683:2019+AC:2019 (type IIR)

Tiltenkt bruk: Produktet brukes av helsepersonell og pasienter for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Den er ikke steril.

Kontraindikasjoner og advarsler: Ingen

Merk:

1. Produktet er ment for engangsbruk, skal ikke gjenbrukes.
2. Sjekk at emballasjen er hel før bruk. Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.
3. Produktet skal ikke brukes nær fyrverkeri eller åpen flamme.
4. Den beste tiden for kontinuerlig bruk for dette produktet er fire timer.

Metode

1. Plasser masken over nesen og munnen, med den hvite siden mot ansiktet og nesestykket vendt oppover. Sett de elastiske øreløkkene rundt ørene.
2. Bruk fingertuppene til å trykke på nesestykket øverst på masken på begge sider av nesen mot nesebroen. Trekk deretter masken ned over haken under munnen slik at den ikke rynker og nesen og munnen dekkes så godt som mulig.

Oppbevaring

Temperaturen bør ikke overskride 40 °C, og den relative luftfuktigheten bør ikke overskride 80 %. Det bør lagres i et kjølig, tørt og godt ventilert miljø uten korroderende gasser.

Transport

Produktet bør behandles forsiktig under transport for å unngå at det faller mer enn to meter ned. Beskyttet mot trykk, direkte sollys, regn og snø.

Produktets utløpsdato

2 år

Gjeldende tekniske standarder

EN 14683:2019+AC:2019 Medisinske ansiktsmasker – Krav og prøvingsmetoder

Europeisk importør

HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH
 Zum Pier 79 | 44536 Lünen | Tyskland
 Tlf. +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | Faks +49 (0)2 31/ 88 08 85-58
 E-post: sales@hum-online.de | <https://www.hum-online.de>












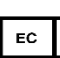


Produsent

Selskapets navn: Jiangsu Weikang Jiejing Medical Apparatus Co., Ltd.
 Adresse: No. 18, Wenzhou Road, Economic Development Zone, Shuyang, Kina

Autorisert representant i Den europeiske union

Selskapets navn: Lotus NL B.V.
 Adresse: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Nederland

Etikettidentifikasjon:

	Batch-nummer		Skal ikke gjenbrukes
	Les instruksjonsheftet grundig før bruk		Gyldighet
	Advarsel og merknader, det henvises til bruksanvisningen		Produsent
	Ikke-steril		Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Produksjonsdato: XXXX-XX-XX		Hold tørr
	Produktet oppfyller de grunnleggende europeiske kravene i MDD 93/42/EØS		Autorisert representant i Den europeiske union
	Øvre grense på temperatur 40 °C		Øvre grense for luftfuktighet 80 %